


Adaptateur BD Vacutainer® Luer-Lok™ avec corps pré-monté


LLAD - réf 364902

Recommandations d'utilisation


D'une manière générale, il n'est pas recommandé de réaliser de prélèvement de sang à partir d'un cathéter. Si cela ne peut être évité, il est important de ne pas prélever sur une voie en place ayant déjà été rincée ou perfusée avec de l'héparine et d'effectuer le prélèvement à la pose du cathéter.

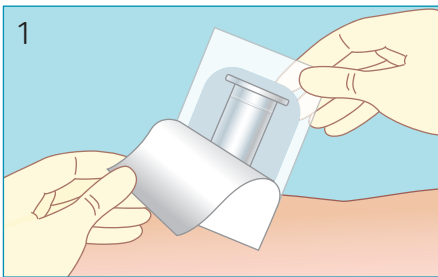


1
Le dispositif LLAD est conditionné sous emballage individuel stérile. Retirer l'opercule pelable au moment de l'utilisation.

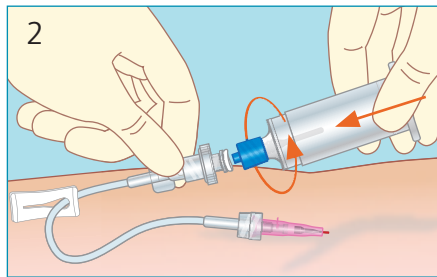

2
Enfoncer le cône Luer-Lok™ du dispositif de manière rectiligne puis visser d'un quart de tour (à la pose du cathéter).

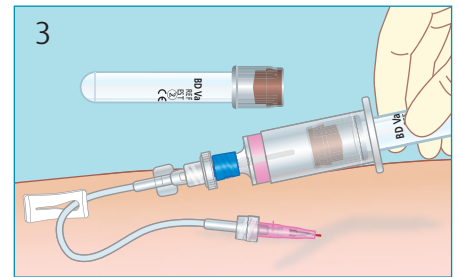


3
Purger à l'aide du tube neutre sans additif BD Vacutainer® (3 mL) : 2 fois le volume mort, ou 6 fois le volume mort pour les tests de coagulation¹, soit 1 à 2 tubes de purge.

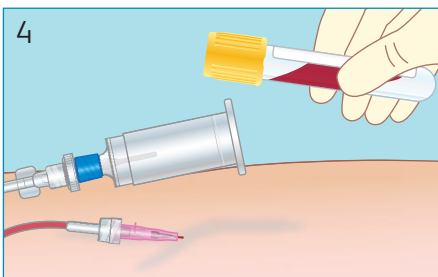


4
Réaliser le prélèvement selon votre technique habituelle. Ordre de prélèvement :



Important : Homogénéiser les tubes par plusieurs retournements lents successifs.

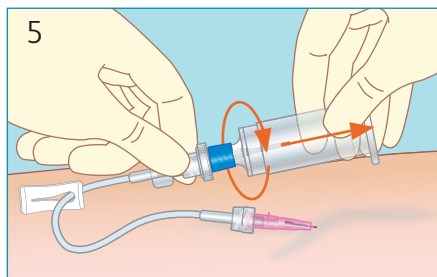

5
Déconnecter le dispositif en dévissant d'un quart de tour, et l'éliminer selon le protocole en vigueur.

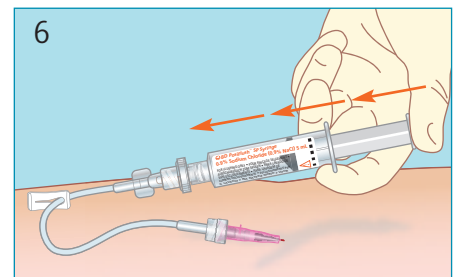

6
Effectuer un rinçage pulsé du cathéter.² Adapter la séquence de clampage selon le type de valve et déconnecter la seringue. Fixer le cathéter.

1. CLSI. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard. GP41-A6 (H3-A6) §11.3.2. 2007.

2. Volume de rinçage : au minimum 2 fois le volume mort cathéter + prolongateur. INS (Infusion Nurses Society) Infusion Nursing Standards of Practice 2016. 40C.

Dispositif BD Vacutainer® LLAD, avec adaptateur Luer-Lok™ et corps intégré, stérile, à usage unique, pour prélèvement de sang. Dispositif médical classe I stérile (directive 93/42/CE), CE 0050. Mandataire UE : BD Plymouth, UK.. Pour un bon usage de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation. Pris en charge par l'assurance maladie.

Suisse :
BD AG, Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil

bd.com/ch

