

Aiguille Sécurité BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™




Corps intégré


avec indicateur
de retour
veineux




Recommandations d'utilisation

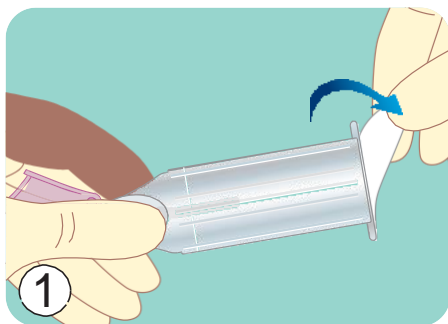


1
Retirer l'opercule de protection du corps.
Le dispositif est prêt à l'emploi.

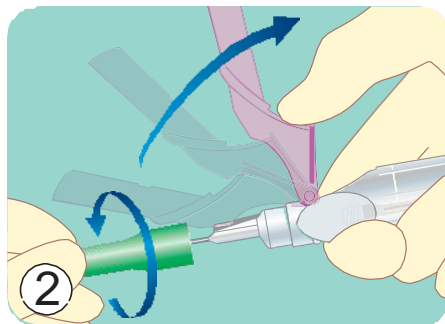


2
Rabattre la gaine de protection rose vers
l'arrière.
Dévisser le capuchon protecteur de couleur
et le retirer.

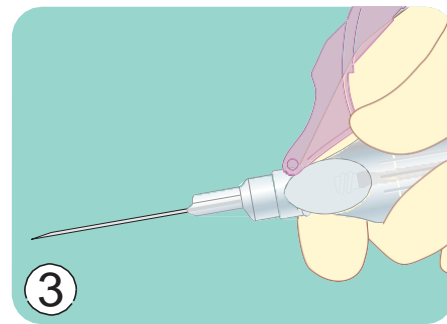


3
Le biseau de l'aiguille est aligné avec la
gaine de protection, en position adéquate
pour le prélèvement.
Ne pas faire tourner ou pivoter la gaine de
protection rose.

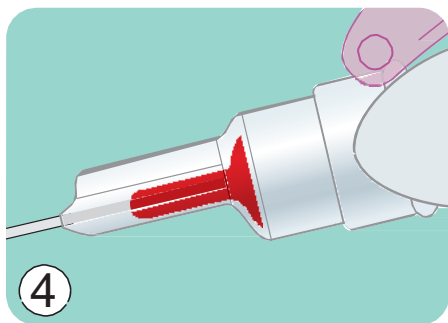

4
L'accès veineux est immédiatement confirmé
par la présence de sang dans la chambre de
visualisation.

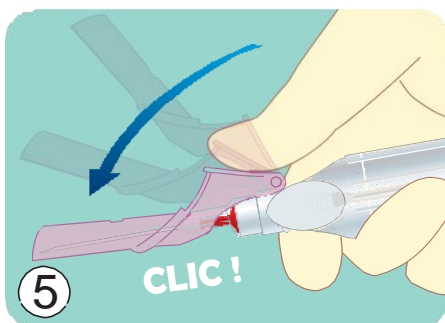

5
Dès le retrait de l'aiguille de la veine,
positionner fermement le pouce sur la zone
poussoir de la gaine de protection rose.
La repousser pour recouvrir l'aiguille jusqu'au
clic sonore.

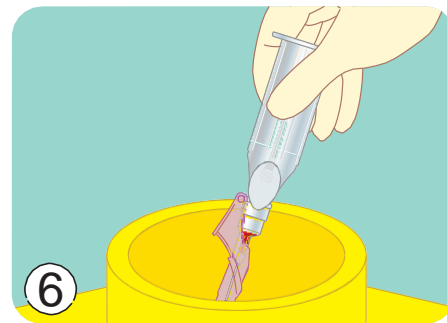

6
Immédiatement après l'activation de la gaine
de protection, éliminer le dispositif dans le
collecteur prévu à cet effet.

Références :

368835 (avec corps intégré) - Aiguille 21G (8/10), 32mm, verte

368836 (avec corps intégré) - Aiguille 22G (7/10), 32mm, noire